

# BABY BOOM test ciążowy strumieniowy, 1 sztuka

cena: 4,99 PLN



## Opis słownikowy

Postać	test strumieniowy
Producent	PASO
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	oznaczenie stężenia hCG w moczu

## Opis produktu

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, przeznaczony do użytku domowego, jednorazowego użycia. Jest to szybki test służący do oznaczania gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w próbkach moczu, w celu wczesnego rozpoznania ciąży u kobiet. Dokładność testu:  $\geq 99\%$ , czułość testu: stężenie hormonu hCG od 25 mu/ml.

## BABY BOOM test ciążowy strumieniowy - zastosowanie:

wczesna diagnostyka ciąży

## BABY BOOM test ciążowy strumieniowy - charakterystyka produktu:

test hCG jest szybkim, jednoetapowym testem immunochromatograficznym. Membrana z paskiem absorpcyjnym jest umieszczona nad paskiem z włókna szklanego, impregnowanym koloidalnym koniugatem cząsteczek złota i przeciwciał monoklonalnych przeciwko hCG. Drugi pasek absorbujący, umieszczony na skraju płytki, wchłania nadmiar płynnej próbki. Na płytkę z membraną chromatograficzną nanosi się próbkę moczu.

W chwili kontaktu z membraną, próbka moczu rozpuszcza liofilizowany koniugat. W próbce reaktywnej antygen hCG przyłącza się do przeciwciał w roztworze koloidalnym. Podczas przemieszczania się koniugatu wzdłuż membrany, monoklonalne przeciwciała anti-hCG w obszarze testowym (T) wiążą się z kompleksem koniugatu hCG-złoto, tworząc różową linię (T). Dodanie każdej próbki powoduje pojawienie się różowej linii w obszarze kontrolnym (C). Linia ta tworzy się wskutek związania poliklonalnych przeciwciał mysich IgG (znajdujących się w obszarze kontrolnym) z koniugatem próbki i złota koloidalnego. Obecność linii kontrolnej oznacza, że test został przeprowadzony prawidłowo.

## BABY BOOM test ciążowy strumieniowy - zawartość opakowania:

- saszetka foliowa zawierająca strumieniowy test ciążowy: 1 szt.
- instrukcja użycia: 1 szt.