

COMPEED PLASTRY NA ODCISKI, 10 sztuk



cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	plaster
Producent	JOHNSON & JOHNSON
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	na odciski

Opis produktu

Technologia hydrokoloidu COMPEED® to aktywny żel wspomagający nawilżanie. Plastry działają jak druga skóra, pomagają utrzymywać naturalne nawilżenie skóry, aby: ochraniać przed otarciami i uciskiem, przynosić natychmiastową ulgę w bólu i ucisku spowodowanym przez odciski, nawilżać i zmiękczać odcisk, pomagając go usunąć.

COMPEED PLASTRY NA ODCISKI - wskazania:

odciski

COMPEED PLASTRY NA ODCISKI - sposób użycia:

umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się czy skóra dotknięta odciskiem nie jest tłusta od kremu czy oliwki. Usuń górną warstwę papierową, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej. Nałóż plaster mocno na odcisk, upewniając się, że brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry. Pozostaw plaster na odcisku aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni. Dla uzyskania lepszych rezultatów używaj COMPEED® aż do czasu kiedy skóra będzie całkowicie wyleczona

COMPEED PLASTRY NA ODCISKI - przeciwwskazania:

reakcja alergiczna; nie stosować na zainfekowane rany