

## COREGA MAX MOCOWANIE+OSŁONA miętowy, 40 g

cena: 19,99 PLN

### Opis słownikowy

Marka	Corega
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	mocuje protezę



### Opis produktu

- MAX MOCOWANIE - najsilniejsze mocowanie dla Twojej protezy - odpowiednie dla protez całościowych i częściowych. Teraz możesz jeść wszystko, co tylko zechcesz!
- NAJWYŻSZY KOMFORT - podwójne działanie: Najsilniejsze Mocowanie+ Najwyższy Komfort. Tworzy miękką warstwę amortyzującą, która pomaga absorbować nacisk protezy.
- PRECYZYJNA APLIKACJA - specjalna końcówka umożliwia precyzyjne i równomierne nakładanie odpowiedniej ilości produktu.
- NIE OBAWIAJ SIĘ JEDZENIA - klinicznie udowodnione udoskonalone mocowanie przez 12 godzin. Zapewnia większą szczelność i komfort, dzięki czemu możesz cieszyć się z jedzenia bez ograniczeń.
- BEZ CYNKU: ten krem mocujący nie zawiera cynku.
- MIĘTOWY SMAK
- OSŁONA PRZED DROBINKAMI JEDZENIA: blokuje do 5x więcej drobinek jedzenia.

### COREGA MAX MOCOWANIE+OSŁONA miętowy - wskazania:

do mocowania protez zębowych częściowych i całkowitych

### COREGA MAX MOCOWANIE+OSŁONA miętowy - skład:

kopolimer wapniowo-sodowy PVM / MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna, aromat, CI 73360, CI 15850

### COREGA MAX MOCOWANIE+OSŁONA miętowy - sposób użycia:

1. Protezę należy umyć i wysuszyć. Nanosić krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi. Proteza górna: nakładać długim ciągłym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy. Proteza dolna: produkt nakładać długim ciągłym paskiem.

Proteza częściowa: nałożyć dwa krótkie paski

3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.

4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

Sposób usuwania:

1. Przepłukać jamę ustną wodą.

2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.

3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.

4. Użyć tabletki do czyszczenia protez Corega zgodnie z instrukcją, aby dokładnie wyczyścić protezę

### **COREGA MAX MOCOWANIE+OSŁONA miętowy - przeciwwskazania:**

nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.