

COREGA MAX MOCOWANIE+ŚWIEŻOŚĆ podwójnie miętowy, 40 g



cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Marka	Corega
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	mocuje protezę

Opis produktu

- **MAX MOCOWANIE** - najsilniejsze mocowanie dla Twojej protezy - odpowiednie dla protez całościowych i częściowych. Teraz możesz jeść wszystko, co tylko zechcesz!
- **NAJWYŻSZY KOMFORT** - podwójne działanie: Najsilniejsze Mocowanie+ Najwyższy Komfort. Tworzy miękką warstwę amortyzującą, która pomaga absorbować nacisk protezy.
- **PRECYZYJNA APLIKACJA** - specjalna końcówka umożliwia precyzyjne i równomierne nakładanie odpowiedniej ilości produktu.
- **NIE OBAWIAJ SIĘ JEDZENIA** - klinicznie udowodnione udoskonalone mocowanie przez 12 godzin. Zapewnia większą szczelność i komfort, dzięki czemu możesz cieszyć się z jedzenia bez ograniczeń.
- **BEZ CYNKU**: ten krem mocujący nie zawiera cynku.
- **DŁUGOTRWAŁA ŚWIEŻOŚĆ**: krem mocujący aromatyzowany jest olejkami mięty pieprzowej, mięty zielonej i naturalnym olejkiem bazyliowym, który nadaje odświeżający smak.

COREGA MAX MOCOWANIE+ŚWIEŻOŚĆ podwójnie miętowy - wskazania:

do mocowania protez zębowych częściowych i całkowitych

COREGA MAX MOCOWANIE+ŚWIEŻOŚĆ podwójnie miętowy - skład:

kopolimer wapniowo-sodowy PVM/MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna, aromat, alkohol benzylowy

COREGA MAX MOCOWANIE+ŚWIEŻOŚĆ podwójnie miętowy - sposób użycia:

1. Protezę należy umyć i wysuszyć. Nanosić krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.

Proteza górna: nakładać długim ciągłym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy.

Proteza dolna: produkt nakładać długim ciągłym paskiem.

Proteza częściowa: nałożyć dwa krótkie paski

3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.

4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

Sposób usuwania:

1. Przeplukać jamę ustną wodą.

2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.

3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.

4. Użyć tabletki do czyszczenia protez Corega zgodnie z instrukcją, aby dokładnie wyczyścić protezę

COREGA MAX MOCOWANIE+ŚWIEŻOŚĆ podwójnie miętowy - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.