

HELP 4SKIN GOJENIE RAN aerozol, 75 g



cena: 35,49 PLN

Opis słownikowy

Postać	aerozol
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	przyspiesza gojenie

Opis produktu

HELP 4SKIN GOJENIE RAN aerozol - działanie:

wyrób medyczny, który w sposób pośredni przyspiesza gojenie ran poprzez regulację ich mikrośrodowiska

HELP 4SKIN GOJENIE RAN aerozol - wskazania:

dla dorosłych i dzieci powyżej 2 lat do stosowania w przewlekłych ranach, takich jak:

- rany (w tym chirurgiczne)
- odleżyny
- otwarte owrzodzenia nóg
- otarcia
- powierzchowne oparzenia

Preparat może być również stosowany w przypadku ran i owrzodzeń stóp powstałych w wyniku stanów cukrzycowych. Diabetycy z problemami stóp powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Help4Skin Gojenie ran.

HELP 4SKIN GOJENIE RAN aerozol - skład:

kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu

HELP 4SKIN GOJENIE RAN aerozol - sposób użycia:

- zamknięte rany:

1. oczyścić i zdezynfekować leczony obszar
2. nałożyć preparat na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora
3. w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster

- otwarte rany:

1. oczyścić i zdezynfekować ranę
2. dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą
3. nałożyć grubą warstwę preparatu (0.5-0.75 cm) na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora
4. założyć plaster lub bandaż
5. zmieniać żel i plaster lub bandaż przynajmniej raz dziennie, zmniejszyć ilość stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi się strup

Uwaga! W przypadku oparzeń - należy najpierw przemyć wodą, następnie przejść do następujących punktów.

HELP 4SKIN GOJENIE RAN aerozol - przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
- nie stosować na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe