

ICEMIX sztuczny lód, 400 ml



cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	aerazol
Producent	TECWELD
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	uśmierza ból

Opis produktu

ICEMIX sztuczny lód - działanie:

uśmierza ból przez błyskawiczne obniżenie temperatury ciała w miejscu kontuzji. Umożliwia szybkie podjęcie dalszej aktywności sportowej, nie dopuszczając do tworzenia się krwiaków i sińców. Może być stosowany w terapii kriogenicznej pod nadzorem lekarza.

ICEMIX sztuczny lód - wskazania:

dla sportowców w celu uśmierzenia bólu i złagodzenia skutków kontuzji, zwichnięć, stłuczeń

ICEMIX sztuczny lód - skład:

propan, butan, alkohol izo-propylowy, mieszanina olejków aromatycznych

ICEMIX sztuczny lód - sposób użycia:

wstrząsnąć przed użyciem, spryskiwać kontuzję z odległości 15-20 cm nie dłużej niż 3-5 sekund, można czynność powtórzyć

ICEMIX sztuczny lód - przeciwwskazania:

uczulenie na którykolwiek składnik preparatu; nie stosować na błony śluzowe, otarcia, rany