

JASNUM SENSI żel intymny, 50 ml



cena: 34,49 PLN

Opis słownikowy

Postać	żel
Producent	USP ZDROWIE
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	nawilżenie miejsc intymnych

Opis produktu

JASNUM SENSI żel intymny to produkt niehormonalny i hipoalergiczny. Nie zawiera substancji zapachowych, PEG, parabenów, detergentów, w tym SLS, SLES. Preparat wegański, nietestowany na zwierzętach. Nie brudzi bielizny. Można stosować z prezerwatywami lateksowymi, poliuretanowymi i poliizoprenowymi.

JASNUM SENSI - działanie:

- po aplikacji wyrobu na zewnętrzną powierzchnię narządów płciowych, w trakcie stosunku płciowego lub wykonywania badań ginekologicznych, następuje wytworzenie nawilżającej powłoki ochronnej, utrzymującej się w miejscu aplikacji, co znacznie redukuje tarcie i wpływa na zmniejszenie bólu i ochronę nabłonka w przypadku suchości błony śluzowej.
- zastosowanie lubrykantu wpływa na ochronę błony śluzowej podczas stosunku oraz wykonywania badań ginekologicznych poprzez wspieranie naturalnego nawilżenia, co pozwala uniknąć mechanicznych mikrouszkodzeń, otarć i podrażnień naskórka oraz śluzówki

JASNUM SENSI - wskazania:

- ułatwienie stosunków płciowych przy utrudnionej penetracji (m.in. w przypadku suchości pochwy), także z użyciem prezerwatyw
- łagodzenie dolegliwości bólowych w obrębie narządów płciowych w trakcie stosunku płciowego
- łagodzenie objawów suchości pochwy prowadzącej do tarć i uszkodzeń nabłonka miejsc intymnych w trakcie stosunku płciowego
- wspomaganie przeprowadzenia badań ginekologicznych oraz dopochwowego pomiaru temperatury

JASNUM SENSI - skład:

glicerol, kwas cytrynowy, hydroksyetyloceluloza, fenyletanol, glikol kaprylowy, woda oczyszczona.

JASNUM SENSI - sposób użycia:

przed aplikacją żelu dokładnie umyć ręce. Żel można stosować w ilości zależnej od potrzeb, kilka razy dziennie, regularnie, bez ograniczeń wiekowych. Produkt należy nałożyć na miejsce narażone na otarcie, przed stosunkiem lub badaniem ginekologicznym. Wyrób można stosować w kontakcie z prezerwatywami lateksowymi, poliuretanowymi i poliizoprenowymi. Żel można stosować bezpośrednio na prezerwatywę. UWAGA: wyrób medyczny nie jest środkiem antykoncepcyjnym i nie zawiera środków plemnikobójczych.

JASNUM SENSI - przeciwwskazania:

- nadwrażliwość (alergia) na którykolwiek ze składników wyrobu
- uczucie pieczenia, świąd lub zaczerwienienie w trakcie stosowania - należy zaprzestać stosowania wyrobu i w przypadku braku ustąpienia objawów skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
- w ciąży oraz w okresie karmienia stosować tylko po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą
- żel może wpływać na ruchliwość plemników i zmniejszać zdolność do zajścia w ciążę
- nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może zmniejszać lub opóźniać ich działanie