

Pieluchomajtki dla dorosłych SENI SUPER MEDIUM 75-110 cm, 30 sztuk

cena: 59,49 PLN



Opis słownikowy

Postać	pieluchomajtki
Producent	TZMO
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	nieutrzymanie moczu

Opis produktu

Klasyczne oddychające pieluchomajtki to dobre i sprawdzone zabezpieczenie przeznaczone zarówno dla osób aktywnych, jak i dla tych o ograniczonej mobilności. Idealne dopasowują się do ciała oraz zapewniają zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów). Pieluchomajtki redukują nieprzyjemny zapach oraz chronią przed wyciekami. Zapewniają swobodne oddychanie skóry oraz minimalizują ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Na wyrobie znajduje się podwójny indykator wilgotności, który stanowi precyzyjną informację o stopniu napełnienia pieluchy i konieczności jej zmiany. Możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy

Pieluchomajtki dla dorosłych SENI SUPER MEDIUM 75-110 cm - wskazania:

dla osób ze średnią inkontynencją

Pieluchomajtki dla dorosłych SENI SUPER MEDIUM 75-110 cm - sposób użycia:

aktywowane pieluchomajtki włóż między nogi trzymając produkt ułożony w formie łódki. Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała. Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinione i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało. Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.