

# Pieluchomajtki dla dorosłych SENI SUPER PLUS SMALL 55-80 cm, 30 sztuk

cena: 71,99 PLN



## Opis słownikowy

Postać	pieluchomajtki
Producent	TZMO
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	nietrzymanie moczu

## Opis produktu

Oddychające pieluchomajtki nocne przeznaczone dla osób aktywnych, jak i dla tych o ograniczonej mobilności. Super Seni Plus zapewniają: idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów), szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego, redukcję nieprzyjemnego zapachu, ochronę przed wyciekami, swobodne oddychanie skóry, minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych i możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy

## Pieluchomajtki dla dorosłych SENI SUPER PLUS SMALL 55-80 cm - wskazania:

dla osób ze średnią/ciężką inkontynencją

## Pieluchomajtki dla dorosłych SENI SUPER PLUS SMALL 55-80 cm - sposób użycia:

rozłóż pieluchomajtki, chwyc je za dwa końce i lekko pociągnij. Złóż pieluchomajtki wzdłuż na pół i lekko rozciągnij. Aktywowane pieluchomajtki włóż między nogi, trzymając je ułożone w formie łódki. Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała. Zapnij pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia. Przyczep je lekko skośnie do góry. Górne przylepcorzepty przyklej dopasowując pieluchomajtki do talii. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i odpowiednio przylega do ciała oraz czy osłonki boczne nie są zwinięte. Ważne jest aby w żadnym miejscu pielucha nie wpijała się w ciało. Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.