

Pieluchomajtki dla dorosłych SENI SUPER QUATRO EXTRA LARGE 130-170 cm, 10 sztuk

cena: 34,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	pieluchomajtki
Producent	TZMO
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	nierzywanie moczu

Opis produktu

Klasyczne oddychające pieluchomajtki to dobre i sprawdzone zabezpieczenie przeznaczone zarówno dla osób aktywnych, jak i dla tych o ograniczonej mobilności. Super Seni Quatro zapewniają: idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów), szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego, redukcję nieprzyjemnego zapachu, ochronę przed wyciekami, swobodne oddychanie skóry, minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych oraz możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy

Pieluchomajtki dla dorosłych SENI SUPER QUATRO EXTRA LARGE 130-170 cm - wskazania:

dla osób z bardzo ciężką inkontynencją

Pieluchomajtki dla dorosłych SENI SUPER QUATRO EXTRA LARGE 130-170 cm - sposób użycia:

rozłóż pieluchomajtki, chwyc je za dwa końce i lekko pociągnij. Złóż pieluchomajtki wzdłuż na pół i lekko rozciągnij. Aktywowane pieluchomajtki włóż między nogi, trzymając je ułożone w formie łódki. Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała. Zapnij pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia. Przyczep je lekko skośnie do góry. Górne przylepcorzepy przyklej dopasowując pieluchomajtki do talii. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i odpowiednio przylega do ciała oraz czy ostonki boczne nie są zwinięte. Ważne jest aby w żadnym miejscu pielucha nie wpijała się w ciało. Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.