

SALVEQUICK MED PLASTER NA ODCISKI, 6 sztuk



cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	plaster
Producent	CEDERROTH
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Zastosowanie	na odciski

Opis produktu

Plaster ochronny z perforowanym opatrunkiem, który pomaga zmniejszyć ucisk i tym samym łagodzi ból. Plaster zawiera kwas salicylowy (40%), który pomaga usunąć odcisk i zrogowacenia skóry. Redukuje ból, łagodzi nacisk, pomaga usunąć odcisk

SALVEQUICK MED PLASTER NA ODCISKI - wskazania:

odciski

SALVEQUICK MED PLASTER NA ODCISKI - sposób użycia:

skórę umyć, osuszyć, plaster umieścić na odcisku – upewnić się, że okrąg w centrum plastra znajduje się bezpośrednio na odcisku lub zrogowaceniu; plaster zmieniać codziennie, po 4 dniach rdzeń odcisku będzie można usunąć poprzez namoczenie stopy w gorącej wodzie z dodatkiem soli lub mydła. W razie potrzeby czynność powtórzyć

SALVEQUICK MED PLASTER NA ODCISKI - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na kwas salicylowy/salicylany; nie stosować na rany lub na uszkodzoną skórę; nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia ani u kobiet w ciąży