

STÉRIMAR BABY HIGIENA NOSA, 100 ml

cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	aerozol
Problem	katar
Producent	FUMOUBE
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	nawilżenie nosa, oczyszczenie

Opis produktu

Wyrób medyczny polecany dzieciom w wieku od 0 do 3 lat. Nie zawiera konserwantów

STÉRIMARTM BABY HIGIENA NOSA - działanie:

oczyszcza oraz zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia błony śluzowej nosa i wspomaga jej regenerację

STÉRIMARTM BABY HIGIENA NOSA - wskazania:

do delikatnego oczyszczania nosa i usuwania zanieczyszczeń (kurz, drobne cząstki pyłu, śluz, alergeny); do nawilżania i przywracania naturalnej wilgotności błony śluzowej nosa (ogrzewanie, klimatyzacja); zapobieganie schorzeniom laryngologicznym (przeziębienie, zapalenie zatok, infekcje uszu) poprzez wzmacnianie mechanizmów obronnych błony śluzowej nosa

STÉRIMARTM BABY HIGIENA NOSA - skład:

przefiltrowana woda morska

STÉRIMARTM BABY HIGIENA NOSA - sposób użycia:

higiena i nawilżenie błony śluzowej nosa – rozpylić 1-2 razy w każdym otworze, a przed wydmuchaniem nosa pozwolić, by nadmiar roztworu wypłynął; głębsze oczyszczenie – przechylić głowę dziecka na bok, delikatnie umieścić końcówkę aplikatora w górnej części otworu nosowego. Naciskać podstawę aplikatora przez 2 sekundy. Pozwolić, by nadmiar roztworu wypłynął przez drugi otwór nosowy, a następnie wydmuchać nos

STÉRIMARTM BABY HIGIENA NOSA - przeciwwskazania:

Brak