

TENA SLIP PROSKIN MAXI pieluchomajtki rozm. M 73-122 cm, 10 sztuk



cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	pieluchomajtki
Producent	ESSITY
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	nieдержание мочу

Opis produktu

Uniwersalny produkt na nietrzymanie moczu o otwartej konstrukcji z regulowanymi rzepami umożliwiającymi idealne dopasowanie, dzięki czemu zapewnia komfort i ochronę przed przeciekaniem. TENA Slip ProSkin wykonane są z materiału podobnego do tkaniny, zapewniają ściśle dopasowanie i znakomite zabezpieczenie przed przeciekaniem dzięki superchłonnemu wkładowi. To idealne rozwiązanie dla osób unieruchomionych lub z ograniczeniami ruchowymi. Dzięki technologii FeelDry Advanced™ produkt szybko wchłania płyn, pozostawiając suchą skórę. Szybkochłonny wkład błyskawicznie wiąże wewnątrz nawet duże ilości moczu, dając uczucie suchości, a w pełni oddychający panel tylny ConfioAir™ pozwala skórze oddychać. Wszystkie te cechy pomagają zachować naturalne zdrowie skóry. Otwarta konstrukcja z mocnymi rzepami umożliwia łatwą zmianę produktu w pozycji leżącej lub stojącej. Rzepy można wielokrotnie zapinać i odpinać, aby uzyskać idealne dopasowanie. Produkt zapewnia większą świeżość dzięki neutralizatorowi zapachu oraz wskaźnikowi wilgoci, który pokazuje, kiedy należy zmienić pieluchomajtki.

TENA PROSKIN SLIP MAXI - wskazania:

dla osób z ciężką i bardzo ciężką inkontynencją

TENA PROSKIN SLIP MAXI - sposób użycia:

rozłożone pieluchomajtki włóż między nogi, trzymając produkt ułożony w formie łódki. Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała. Umocuj pieluchomajtki za pomocą rzepów, zaczynając od dolnego zapięcia. Następnie umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało. Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.