


VISCOPLAST OPTI-PLAST JUNIOR, 10 sztuk

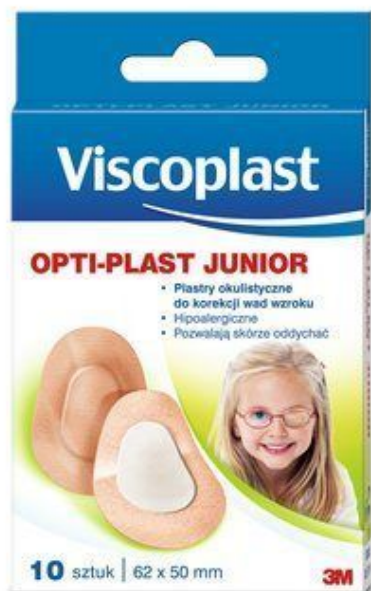

cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	plaster
Producent	3M POLAND MANUFACTURING
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	opatrunek

Opis produktu

Hipoalergiczne plastry okulistyczne na podłożu włókninowym z miękkim opatrunkiem umożliwiają swobodne ruchy gałki ocznej. Komfortowe i oddychające, zapewniają dużą przepuszczalność powietrza i pary wodnej. Plastry są bezbolesne w odklejaniu i bezpieczne dla delikatnej oraz wrażliwej skóry

VISCOPLAST OPTI-PLAST JUNIOR - zastosowanie:

w terapii okluzyjnej oczu, np. w leczeniu zezów i Amblyopii „leniwe oko”

VISCOPLAST OPTI-PLAST JUNIOR - sposób użycia:

skórę wokół oka umyć i osuszyć. W przypadku suchej skóry posmarować okolicę oka kremem nawilżającym i dopiero po 30-60 min. zastosować plaster. Usunąć papier zabezpieczający, lekko przymknąć oko uważając, by nie napinać mięśni. Przyłożyć opatrunek centralnie na oko, węższą stroną do nosa, i rozpocząć przyklepanie od strony nosa w kierunku brwi. Nie naciągać plastra ani skóry wokół oka. Po umieszczeniu plastra lekko docisnąć palcem część przylepną wokół oka

VISCOPLAST OPTI-PLAST JUNIOR - w opakowaniu:

10 sztuk w rozmiarze 62x50 mm