

VISCOPLAST STERI-STRIP PASKI DO ZAMYKANIA RAN białe, 8 sztuk



cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	plaster
Producent	3M
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	do zamykania ran

Opis produktu

Plastry zamykające rany zabezpieczają rozcięcie i łączą jego brzegi, wspierając leczenie. Do stosowania w miejscach o niskim napięciu skóry. Zmniejszają ryzyko powstania widocznej blizny, są wytrzymałe i nieinwazyjne.

VISCOPLAST STERI-STRIP PASKI DO ZAMYKANIA RAN - zastosowanie:

do zamykania płytkich ran, cięć

VISCOPLAST STERI-STRIP PASKI DO ZAMYKANIA RAN - sposób użycia:

oczyścić miejsce w promieniu przynajmniej 5 cm od brzegów rany i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Listek zgiąć wzdłuż perforowanej linii i oderwać krawędź, zbliżyć starannie do siebie oba brzegi rany i rozpoczynając od środka, umieścić pierwszy pasek prostopadle do rany. Unikać naprężania podczas przyklejania. Zastosować kilka pasków w niewielkich odstępach 2-3 mm od siebie. W celu usunięcia paska należy ostrożnie ściągnąć oba końce w kierunku miejsca cięcia.

VISCOPLAST STERI-STRIP PASKI DO ZAMYKANIA RAN - w opakowaniu:

8 pasków: 3 szt. w rozmiarze 6 mm x 75 mm, 5 szt. w rozmiarze 3 mm x 75 mm