

Wkładki na nietrzymanie moczu dla kobiet SENI LADY SUPER 18x37 cm, 15 sztuk

cena: 19,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	wkładki urologiczne
Producent	TZMO
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	nietrzymanie moczu

Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Lady Super stworzone zostały z myślą o kobietach prowadzących aktywny tryb życia. Oddychające, anatomiczne wkładki zapewniają idealne dopasowanie do ciała, redukcję nieprzyjemnego zapachu moczu, ochronę przed wyciekami, szybką i dokładną dystrybucję wilgoci, swobodne oddychanie skóry, zminimalizowane ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, pewniejsze zabezpieczenie przy nietrzymaniu moczu niż przy użyciu klasycznej podpaski, łatwe i pewne mocowanie do bielizny oraz gwarancję dyskrecji i komfortu

Wkładki na nietrzymanie moczu dla kobiet SENI LADY SUPER 18x37 cm - wskazania:

dla kobiet z inkontynencją lekką /średnią

Wkładki na nietrzymanie moczu dla kobiet SENI LADY SUPER 18x37 cm - sposób użycia:

wyjmij wkładkę urologiczną z opakowania i oderwij papier z paska klejowego, umieszczony na spodniej części wkładki. Przyklej wkładkę do bielizny. Sprawdź, czy wkładka jest przyklejona prosto, aby zapewnić sobie wygodę i komfort podczas jej noszenia. Zużyta wkładkę zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytej wkładki do toalety.